



FICHA TÉCNICA

Categoría de producto: Crema abrillantadora universal.

Nombre del producto: Crema de pulir e-diamond.

Propósito de uso: Crema abrillantadora para; acrílicos, resinas, composites, flexibles.

Embalaje: Consulte la etiqueta del producto.

Referencia: PE2313

Registro INVIMA:

PRECAUCIONES:

1. Precaución antes de usar.

- Compruebe que el producto no esté dañado o agrietado.
- No deje caer el producto al suelo ni aplique una fuerza excesiva, ya que esto puede dañarlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Guárdalo a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.

2. Almacenamiento y mantenimiento después de su uso.

- Almacene el producto a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.
- Empaque y almacene el producto adecuadamente para que no se dañe.
- No deje el producto destapado después de usar.
- Guárdelo a temperaturas que pueden oscilar entre 0 °C ~ 40 °C y una humedad relativa de 10% r.H]90%r.h, a presiones atmosféricas de 500 hPa ~ 1060 Hpa.

COMPOSICIÓN:

- Ácidos grasos.
- Cargas minerales.
- Aceites vinílicos.
- Nanopartículas abrasivas.
- Pigmentos orgánicos.
- Aromatizantes naturales.

***Este es un producto de un solo uso.**

1. Características principales.


Especialmente formulado para mejorar la intensidad del brillo en materiales tales como; acrílicos, Composites, Flexibles, entre otros.

- Consistencia suave y baja abrasividad.
- Elimina pequeñas rayas en la superficie.
- Siliconada.
- Abrillanta fácilmente.
- No tóxico.

CUIDADO:

- El uso de este producto es exclusivo para profesionales especializados en la fabricación de prótesis dentales.
- Todas las instrucciones de uso deben seguirse correctamente; cualquier uso inadecuado, o distinto al indicado, es responsabilidad del profesional.
- Deberá respetarse la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- El producto debe almacenarse y manipularse lejos del calor excesivo y la exposición a la luz solar.
- La exposición prolongada a la luz solar puede desencadenar una decoloración en la crema.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

SÍMBOLOS EN EL EMPAQUE:

 REF	NÚMERO DE CATÁLOGO	 ADVERTENCIAS	 LEA INDICACIONES	 NO INGERIR	 TEMPERATURA ALMACENAJE
 LOT: VEN:	LOTE Y FECHA FABRICACIÓN	 FABRICANTE	 NO REUTILIZABLE	 RECICLABLE	 PRODUCTO NO ESTÉRIL

⊗ PREPARACIÓN PREVIA.

La aplicación debe estar previamente supervisada por un profesional especializado.

- Prepare la superficie de la prótesis dejándola lisa y prolíjela.
- Lave y elimine restos de cera y/o suciedad en la superficie.
- Utilice manta limpia para abrillantar.
- Sugerimos hidratar la superficie con agua al final para acentuar el brillo.

ABRILLANTADO CON MICROMOTOR.

- Producto listo para su uso.
- Aplique sobre la superficie la cantidad mínima necesaria sobre el área específica a abrillantar.
- Extienda con movimientos circulares sobre toda el área a abrillantar.
- Con rueda de algodón a una baja velocidad (aprox. 1600rpm) remueva lenta y circularmente extendiendo la crema e hidratando con agua.
- Limpie con paño de microfibra y repita con la rueda de algodón limpia sin crema.
- Lave con agua.

ABRILLANTADO CON MOTOR DE BANCO.

- Producto listo para su uso.
- Aplique sobre la superficie la cantidad mínima necesaria sobre el área específica a abrillantar.
- Extienda con movimientos circulares sobre toda el área a abrillantar.
- Con rueda de felpa o mopa a una baja velocidad (Aprox. 1750rpm) remueva lenta y circularmente extendiendo la crema e hidratando con agua.
- Limpie con paño de microfibra y repita con la rueda de algodón limpia sin crema.
- Lave con agua limpia.



Fecha de Creación: 2023-02-11
Origen: Medellín - Colombia
Coordinador Técnico.
Fecha de Actualización: 2024-03-13
Páginas: 4/4
Fabricación: Eresin Materiales y Equipos S.A.S
Rep. Legal: Fabio David Infante