



FICHA TÉCNICA

Categoría de producto: Glaseador de superficies.

Nombre del producto: Sealglaze.

Propósito de uso: Glasea y abrillanta la superficie de acrílicos, resinas y composites.

Embalaje: Consulte la etiqueta del producto.

Referencia: PE2347

Registro INVIMA:

PRECAUCIONES:

1. Precaución antes de usar.

- Compruebe que el producto no esté dañado o agrietado.
- No deje caer el producto al suelo ni aplique una fuerza excesiva, ya que esto puede dañarlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Guárdalo a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.

2. Almacenamiento y mantenimiento después de su uso.

- Almacene el producto a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.
- Empaque y almacene el producto adecuadamente para que no se dañe.
- No deje el producto destapado después de usar.
- Guárdelo a temperaturas que pueden oscilar entre 0 °C ~ 40 °C y una humedad relativa de 10% r.H|90%r.h, a presiones atmosféricas de 500 hPa ~ 1060 Hpa.

COMPOSICIÓN:

- Agentes catalizadores.
- Monocomponentes.
- Diluyentes.
- Base vinílica

***Este es un producto de un solo uso.**

1. Características principales.

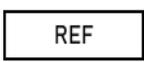
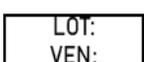
Formulado para la impermeabilización de coronas, puentes, carillas y otros; Genera un brillo de aspecto natural y además sella los microporos que puedan generarse tras la aplicación de los diferentes materiales resinosos, su uso es recomendable en una mono película de 0,10µm y dejar secar el tiempo necesario.

- Longevidad prolongada.
- Resistencias a niveles bajos de pH (ácidos).
- Mayor resistencia a la abrasión.
- Naturalidad.
- No amarillea.

CUIDADO:

- El uso de este producto es exclusivo para profesionales especializados en la fabricación de prótesis dentales.
- Todas las instrucciones de uso deben seguirse correctamente; cualquier uso inadecuado, o distinto al indicado, es responsabilidad del profesional.
- Deberá respetarse la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- El producto debe almacenarse y manipularse lejos del calor excesivo y la exposición a la luz solar.
- Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
- Matener fuera del alcance de los niños.

SÍMBOLOS EN EL EMPAQUE:

 REF	NÚMERO DE CATÁLOGO	 ADVERTENCIAS	 LEA INDICACIONES	 NO INGERIR	 TEMPERATURA ALMACENAJE
 LOT: VEN:	LOTE Y FECHA FABRICACIÓN	 FABRICANTE	 NO REUTILIZABLE	 RECICLABLE	 PRODUCTO NO ESTÉRIL



⊗ PREPARACIÓN PREVIA.

La aplicación debe estar previamente supervisada por un profesional especializado.

- Limpie la superficie antes de aplicar.
- En caso de composites sugerimos eliminar antes la capa inhibida por oxígeno.
- Aplique y deje secar por período de 3 a 5 minutos (Puede airear).
- Mejore la resistencia activando los foto iniciadores en cámara de foto polimerizar por período de 2 minutos.

Fecha de Creación: 2023-06-12

Origen: Medellín – Colombia

Coordinador Técnico.

Fecha de Actualización: 2024-02-15

Páginas: 3/3

Fabricación: Eresin Materiales y Equipos S.A.S

Rep. Legal: Fabio David Infante