



FICHA TÉCNICA

Categoría de producto: Gel refractario para cocción.

Nombre del producto: Gel refractario Resinpeg.

Propósito de uso: Es usado para adherir los elementos ceramicos a los pines de cocción.

Embalaje: Consulte la etiqueta del producto.

Referencia: PE2359

Registro INVIMA:

PRECAUCIONES:

1. Precaución antes de usar.

- Compruebe que el producto no esté dañado o agrietado.
- No deje caer el producto al suelo ni aplique una fuerza excesiva, ya que esto puede dañarlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Guárdalo a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.

2. Almacenamiento y mantenimiento después de su uso.

- Almacene el producto a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.
- Empaque y almacene el producto adecuadamente para que no se dañe.
- No deje el producto destapado después de usar.
- Guárdelo a temperaturas que pueden oscilar entre 0 °C ~ 60 °C y una humedad relativa de 10% r.H]90%r.h, a presiones atmosféricas de 500 hPa ~ 1060 Hpa.

COMPOSICIÓN:

- Agua desionizada.
- Aglutinante.
- Conservantes.
- Compuesto refractario.
- Sulfato.

***Este es un producto de un solo uso.**

1. Características principales.

El Gel refractario es utilizado principalmente para fijar los elementos a los pines previo a la cocción, tales como; coronas, puentes, carillas u otros.

- Durabilidad.
- Fácil aplicación.
- Mayor tiempo de trabajo.
- Resistencia a alta temperatura 1100°C..
- No residuo.
- No tóxico.
- No contamina el horno.

CUIDADO:

- El uso de este producto es exclusivo para profesionales especializados en la fabricación de prótesis dentales fijas.
- Todas las instrucciones de uso deben seguirse correctamente; cualquier uso inadecuado, o distinto al indicado, es responsabilidad del profesional.
- Deberá respetarse la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- El producto debe almacenarse y manipularse lejos del calor excesivo y la exposición a la luz solar.
- La exposición prolongada a la luz ambiental puede desencadenar una pérdida de propiedades físicas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

SÍMBOLOS EN EL EMPAQUE:



⊗ PREPARACIÓN PREVIA.

La aplicación debe estar previamente supervisada por un profesional especializado.

- Prepare la superficie a aplicar.
- Coloque la boquilla de la geringa apuntando a la zona donde desea aplicar.
- Presione la geringa hasta que el material salga por la boquilla.
- Fije al pin antes de introducir al horno.
- Puede aplicar sobre un loceta y con pincel o espátula llevar hasta la corona u otro.
- No aplique con pinceles y/o espátulas sucias.
- Evite el contacto con la humedad.

Fecha de Creación : 2024-05-02

Origen: Medellín – Colombia

Coordinador Técnico.

Fecha de Actualización: 2024-05-02

Páginas: 3/3

Fabricación: Eresin Materiales y Equipos S.A.S

Rep. Legal: Fabio David Infante